

Instrucciones de uso

Kit de extracción de ADN

Kit de extracción registrado

- Su kit de extracción ya está registrado en la plataforma Bsure.
- Toda su información personal está segura como puede leer en nuestra política de privacidad.

Formulario de consentimiento

Firme el formulario de consentimiento. Si su médico toma la muestra en la clínica, también debe firmar el formulario de consentimiento. El segundo formulario de consentimiento es para usted.

Etiqueta del código de barras

Es muy importante que pague la pegatina de código de barras en el tubo de plástico de la muestra (vea también el paso 7 en las instrucciones de uso).

Enviar

Utilice la bolsa de envío de devolución para enviar la muestra de ADN, junto con 1 formulario de consentimiento firmado.

El resultado

El médico seleccionado por usted recibirá los resultados de la prueba en un plazo de 3 a 4 semanas. Usted recibirá un mensaje para hacer una cita con el médico y comentar los resultados de la prueba.



Bsure Medical B.V.
Achillesstraat 85
1076 PX Amsterdam
Nederland

Contact: info@bsuremedical.com



Instrucciones de uso

Kit de extracción de ADN

Instrucciones de uso

Kit de extracción de ADN

Estas instrucciones de uso le ayudarán a extraer y enviar correctamente la muestra de ADN.

Este kit de extracción de ADN contiene:

- Instrucciones de uso
- 2 formularios de consentimiento
- 1 tubo con hisopo de algodón
- 1 par de guantes
- 1 bolsa de plástico transparente "biohazard"
- Pegatinas de código de barras
- Una bolsa de envío de devolución de la muestra de ADN


IMPORTANTE!

Lea atentamente esta información antes de empezar.

La extracción correcta de la mucosa oral es crucial para el resultado de la prueba de ADN. Siga las instrucciones a continuación y los 7 pasos para extraer correctamente la muestra de ADN:

- Use guantes al extraer la muestra de ADN.
- Sostenga el hisopo por el mango mientras toma la muestra de ADN.
- Tome la muestra de ADN inmediatamente después de abrir el paquete.
- No aplique demasiada presión y no doble el hisopo de algodón cuando tome la muestra de ADN, ya que esto puede romperlo.
- Recomendamos NO fumar, comer, beber o cepillarse los dientes al menos 1 hora antes de tomar la muestra de ADN. Enjuáguese la boca con agua antes de tomar la muestra de ADN.


Extraer la muestra de ADN

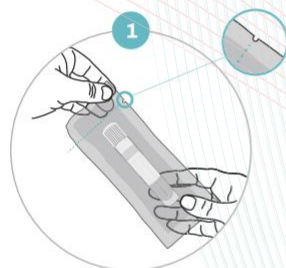


1. Póngase los guantes y saque con cuidado el tubo del paquete (figura 1).



2. Para abrir el dispositivo fácilmente, sostenga el tubo de ensayo con una mano y, con su pulgar, empuje la parte superior de la tapa por encima de la etiqueta (figura 2).

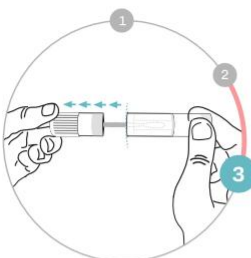

3. Sosteniendo el dispositivo por su tapa, quite la tapa y coloque el tubo de ensayo en posición vertical sobre una superficie limpia, y no lo vuelva a tocar (figura 3).

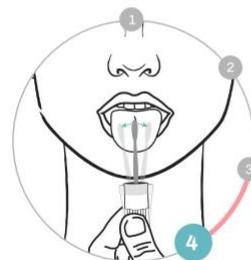


coloque el hisopo dentro de la boca, sobre la lengua. Cierre la boca y mantenga el hisopo en posición durante diez segundos para humedecer el hisopo con saliva (figura 4).



5. Mueva el hisopo entre mejilla y encías. Ayudándose con la otra mano, presione ligeramente hacia abajo en la mejilla y frote el hisopo con fuerza hacia adelante y hacia atrás diez veces (figura 5).



6. Repita el paso 5 en el lado opuesto de la boca (figura 6).

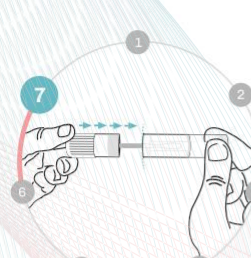

7. Inserte la tapa con el hisopo dentro del tubo de ensayo y cierre firmemente hasta que escuche un clic (figura 7). Pegue la etiqueta con el código de barras en el tubo de plástico para identificar su prueba. No se puede analizar sin un código de barras. Coloque el tubo de muestra en la bolsa de plástico transparente de "riesgo biológico", junto con el formulario de consentimiento firmado. Envíe la muestra a analizar, siguiendo el proceso acordado con su representante de ventas.