

Gebruiksaanwijzing

DNA Sample afnameset

Geregistreerde afnameset

- Uw afnameset is al geregistreerd in uw account op het Bsure platform.
- Al uw persoonlijke gegevens zijn veilig, zoals u kunt lezen in onze privacy policy.

Toestemmingsformulier

Onderteken het toestemmingsformulier. Indien u het DNA sample afneemt bij een kliniek moet ook de arts de schriftelijke toestemming ondertekenen.

Het tweede toestemmingsformulier is voor uzelf.

Barcodesticker

Het is heel belangrijk dat u het DNA sample voorziet van de bijgeleverde barcodestickers (zie stap 5 in de gebruiksaanwijzing).

Verzenden

Gebruik de retour verzendzak voor het verzenden van het DNA sample, samen met 1 ondertekend toestemmingsformulier.

De uitslag

Binnen 4 weken ontvangt de door u geselecteerde arts de resultaten van de test. U ontvangt een bericht om een afspraak te maken, zodat de arts de resultaten met u kan bespreken.



Bsure Medical B.V.
Achillesstraat 85
1076 PX Amsterdam
Nederland

Contact: info@bsuremedical.com



Gebruiksaanwijzing

DNA Sample afnameset

Gebruiksaanwijzing

DNA Sample afnameset

Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het correct afnemen en insturen van het DNA sample.

Deze afnameset bevat:

- een gebruiksaanwijzing
- 2 toestemmingsformulieren
- 1 buis met wattenstaafje
- 1 set handschoenen
- 1 transparant plastic "biohazard" zakje
- Barcodestickers
- Een retour verzendzak


BELANGRIJK!

Lees deze informatie goed door voor u begint


Het juist afnemen van het wangslimvlies is cruciaal voor de uitkomst van de DNA-test. Volg onderstaande instructies en de 5 stappen voor het correct afnemen van het DNA sample:

- Draag handschoenen bij het afnemen van het DNA sample.
- Houd het wattenstaafje vast bij het handvat tijdens het afnemen van het DNA sample.
- Neem het DNA sample direct af na het openen van de verpakking.
- Zet niet te veel druk en buig het wattenstaafje niet bij het afnemen van het DNA sample, hierdoor kan het staafje breken.
- We adviseren om ten minste 1 uur voor het afnemen van het DNA sample niet te roken, eten, drinken of de tanden te poetsen. Spoel wel uw mond met water voordat u het DNA sample afneemt.


Afnemen van het sample

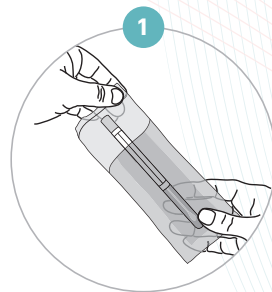

1. Doe de handschoenen aan en haal voorzichtig de buis met het wattenstaafje uit de verpakking.

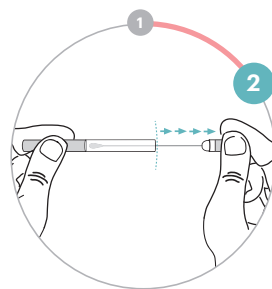


2. Houd het wattenstaafje met twee handen vast. Trek en draai op het zelfde moment het wattenstaafje uit het buisje, met het deel van de dop.

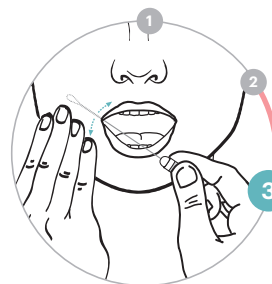

3. Neem het sample af. Beweeg het wattenstaafje naar één kant van de mond en wrijf het gedurende dertig seconden tussen de wang en het tandvlees*. Druk met de andere hand lichtjes op de buitenkant van de wang om de wrijving te vergroten.


*gebruik niet teveel kracht bij het nemen van het sample. Dit kan leiden tot onbedoeld breken van de schacht van het wattenstaafje.

30 seconden

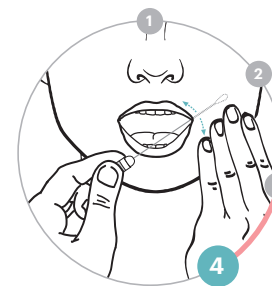

4. Herhaal stap 3 aan de andere kant van de mond.

30 seconden

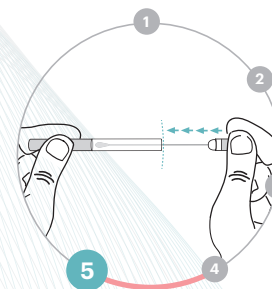

5. Na het afnemen van het sample, plaats het wattenstaafje terug in de plastic buis en sluit deze goed.

HEEL BELANGRIJK:
Plak de barcodesticker op de plastic buis.
Daarmee kunnen we uw test identificeren. Zonder barcode wordt uw test niet geanalyseerd.

Plaats de buis met de sample in het bijgeleverde transparant plastic "biohazard" zakje. Doe het plastic zakje samen met het ondertekende toestemmingsformulier in de retour verzendzak. Stuur de test zo snel mogelijk na afname op.